

Auswertediagramm / Evaluation diagram

KIR genes	Ergebnis Result	Spezifitäten/Specificities	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<input type="checkbox"/> !	Negativ-Kontrolle Negative control	1																					
2DL1	<input type="checkbox"/>	*001-01202,*014-026		2																				
2DL2	<input type="checkbox"/>	*0010101-008,*010-013			3																			
2DL3	<input type="checkbox"/>	*0010101-009,*011-016,*019-032				4																		
2DL4	<input type="checkbox"/>	*00101-00105w,*00201-027					5																	
2DL5A	<input type="checkbox"/>	*001,*005,*012,*014,*015						6	7															
2DL5B	<input type="checkbox"/>	*002-004,*006-011,*01301-01303,*016-018						6		8														
2DS1	<input type="checkbox"/>	*001-006,*008									9													
2DS2	<input type="checkbox"/>	*0010101-008										10												
2DS3	<input type="checkbox"/>	*00101-0020103,*003N-007											11											
2DS4	<input type="checkbox"/>	*0010101-00104,*011,*014-016												12										
2DS4	<input type="checkbox"/>	*003-007,*009,*010,*012,*013												12	13									
2DS4	<input type="checkbox"/>	*008													13									
2DS5	<input type="checkbox"/>	*001-012														14								
3DL1	<input type="checkbox"/>	*00101-002,*0040101-009,0150101-024N,0250101-044,*051-053,*056,*057,*059-077,*079															15							
3DL2	<input type="checkbox"/>	*0010101-042N,*043-063																16						
3DL3	<input type="checkbox"/>	*00101-023,*0250101-057																	17					
3DS1	<input type="checkbox"/>	*010-014,*045-049N,*50,*055,*058,*078,*082-085																			18			
2DP1	<input type="checkbox"/>	*00101-00103,*0020101-014																				19		
3DP1	<input type="checkbox"/>	*001,*002,*004,*007,*009,*011-014																					20	
3DP1*003	<input type="checkbox"/>	*003,*005,*006,*008,*010																					20	21
	<input type="checkbox"/>	Positiv-Kontrolle (Chro 1) positive control (Chro 1)																						22
		Länge/Length in bp		142	142	135	252	163	1640	1640	143	204	212	99	171	108	136	180	191	147	168	157	233	659
<b>Reaktionsmuster / Reaction pattern</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

W = schwach positiv / weak positive

Version: 2.0

01/2015

Proben-ID: / Sample-ID:

Probenname: / Name:

Geb.-Datum: / born:

Ergebnis: / Result:

Datum: / Date:

Unterschrift: / Signature:

**Gelbild / Gel Picture**

# Spezifitätstabelle / Specificity table



## KIR TYPE

09/2015

xxxxxx

7105

Mix #	Größe/Size [bp]	Spezifität / Specificity	Allele / Alleles
1			Negativ-Kontrolle / negative control
2	142	KIR2DL1	*001-01202,*014-026
3	142	KIR2DL2	*0010101-008,*010-013
4	135	KIR2DL3	*0010101-009,*011-016,*019-032 (sometimes weak / manchmal schwach)
5	252	KIR2DL4	*00101-00105w,*00201-027
6	163	KIR2DL5	A*0010101-00105,*0050101-0050104,*01201,*01202,*014,*015 B*0020101-004,*00601-011,*01301-01303,*016-018
7	1640	KIR2DL5	A*0010101-00105,*0050101-0050104,*01201,*01202,*014,*015
8	1640	KIR2DL5	B*0020101-004,*00601-011,*01301-01303,*016-018
9	143	KIR2DS1	*001-006,*008
10	204	KIR2DS2	*0010101-0010112,*00102-00104,*002-008
11	212	KIR2DS3	*00101-00106,*0020101-0020103,*003N-007
12	99	KIR2DS4	*0010101-0010109,*00102-00104,*0030101-0030104, *0040101,*0040102,*0060101,*0060102,*007,*009-016
13	171	KIR2DS4	*0030101-010,*012,*013
14	108	KIR2DS5	*001-012
15	136	KIR3DL1	*0010101-002,*0040101-009,*0150101-023,*024N, *0250101-044,*051-053,*056,*057,*059-077,*079
16	180	KIR3DL2	*0010101-042N,*043-063
17	191	KIR3DL3	*00101-023,*0250101-057
18	147	KIR3DS1	*010-014,*045-049N,*50,*055,*058,*078,*082-085
19	168	KIR2DP1	*00101-00103,*0020101-014
20	157	KIR3DP1	*001-005w,*006w,*007-014 (manchmal unspezifisch / sometimes unspecific)
21	233	KIR3DP1*003	*0030101-0030402,*005,*006,*008,*010
22	659		Positiv-Kontrolle / positive control

01/2015

! Wenn die Negativ Kontrolle eine positive Reaktion zeigt, muß der Test wiederholt werden /  
If the negativ controll shows a positive reaction, the test must be repeated.

### Bemerkungen / Remarks



BAG Health Care GmbH  
Amtsgerichtsstraße 1-5  
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404/925-0 www.bag-healthcare.com  
Fax: +49 (0) 6404/925-250 info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:  
Tel.: +49 (0) 6404/925-450  
Fax: +49 (0) 6404/925-460  
verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:  
Tel.: +49 (0) 6404/925-125  
Fax: +49 (0) 6404/925-421  
service@bag-healthcare.com